

LENTES DE CONTACTO ULTRA® CONFORT


BAUSCH + LOMB
ULTRA® contact
lenses
with MoistureSeal® technology

PARA PRESBICIA


ULTRA LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES PARA PRESBICIA

Brindan confort y visión consistentemente clara durante todo el día.

Diseñados para mejorar la visión¹ y adaptación predecible para un manejo más efectivo del paciente.

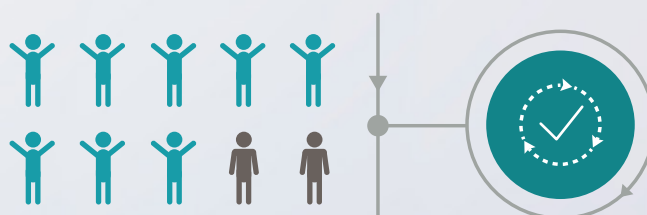

Éxito de colocación en la primera visita **80%²**

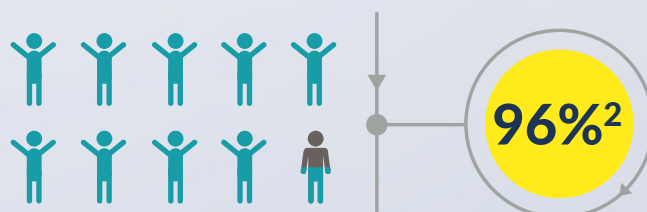

Éxito de colocación en la segunda visita

El **92%** de los especialistas de la salud visual estuvieron de acuerdo que la guía de adaptación facilitó la adaptación.²

PARÁMETROS

MATERIAL:	Samfilcon A
TECNOLOGÍA DEL MATERIAL	Tecnología MoistureSeal®
CONTENIDO DE AGUA	46%
TRANSMISIÓN DE OXÍGENO	163 Dk/t en el centro por -3.00D
TECNOLOGÍA DEL DISEÑO	Diseño 3-Zone Progressive™, óptica esférica cercana al centro
CURVA BASE	8.5 mm
DIÁMETRO	14.2 mm
ESPESOR CENTRAL	0.07 mm @ -3.00D
PODERES ESFÉRICOS	+6.00D a -10.00D en pasos de 0.25D (incluyendo el plano)
ADICIÓN DE PODERES	Low: +0.75D a +1.50D adición de lente High: +1.75D to +2.50D adición de lente
TINTA DE VISIBILIDAD	Azul claro
MODALIDAD	Uso diario, reemplazo mensual

Diseñados para una potencia precisa, para un ajuste más predecible

GUÍA DE ADAPTACIÓN

¿Cómo adaptar Ultra® para Presbicia?

Siga la siguiente guía de adaptación:

Selección del lente inicial

- Parta de la refracción actualizada y adición en anteojos.
- Determine la dominancia ocular en visión lejana.
- Seleccione la potencia de lejos con base al equivalente esférico de la refracción, y realice el ajuste en función de la distancia al vértice si fuese necesario.
- Elija el lente de prueba en base a los cálculos anteriores y seleccione la adición.

Evaluación inicial del lente

- Espere 10 minutos para que el lente de prueba se estabilice en el ojo antes de evaluar la adaptación y la visión.
- Evalúe binocularmente la visión de lejos y de cerca con la iluminación normal del consultorio.
- Si la visión de lejos y cerca es satisfactoria, entregue los lentes de prueba y programe un control en 8 días.

SELECCIÓN DE LA ADICIÓN

ADICIÓN EN GAFAS	AMBOS OJOS
de +0.75D a +1.50D	Adición baja
de +1.75D a +2.50D	Adición alta

CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE PACIENTES

- Motivados
- Astigmatismo refractivo igual o inferior a -1.00D

Para mejorar la visión de cerca

+ SI EL PACIENTE LLEVA LENTE DE ADICIÓN LOW EN AMBOS OJOS:

	OJO DOMINANTE	OJO NO DOMINANTE
LENTE INICIAL	Adición baja	Adición baja
PRIMER AJUSTE	Adición baja	Adaptar adición alta

2º AJUSTE: Si la visión aún no es satisfactoria, añada lentes oftálmicos de la caja de pruebas en pasos de +0.25D en el ojo dominante (llevando adición high en ese ojo) y continuar evaluando la visión binocularmente con iluminación normal. Cambie la potencia del lente de contacto cuando la visión sea satisfactoria.

+ SI EL PACIENTE LLEVA LENTE DE ADICIÓN HIGH EN AMBOS OJOS:

	OJO DOMINANTE	OJO NO DOMINANTE
LENTE INICIAL	Adición alta	Adición alta
PRIMER AJUSTE	Adición alta	Añadir +0.25D en el ojo no dominante

2º AJUSTE: Si la visión aún no es satisfactoria, añada lentes oftálmicos de la caja de pruebas en pasos de +0.25D en el ojo dominante y continuar evaluando la visión binocularmente con iluminación normal. Cambie la potencia del lente de contacto cuando la visión sea satisfactoria.

Para mejorar la visión de lejos

+ SI EL PACIENTE LLEVA LENTE DE ADICIÓN LOW EN AMBOS OJOS:

	OJO DOMINANTE	OJO NO DOMINANTE
LENTE INICIAL	Adición baja	Adición baja
PRIMER AJUSTE	Adaptar lente de contacto monofocal*	Adición baja

2º AJUSTE: Si la visión aún no es satisfactoria, añada lentes oftálmicos de la caja de pruebas en pasos de -0.25D en el ojo dominante (llevando lente de contacto monofocal) y continuar evaluando la visión binocularmente con iluminación normal. Cambie la potencia del lente de contacto cuando la visión sea satisfactoria. *Ultra®

+ SI EL PACIENTE LLEVA LENTE DE ADICIÓN HIGH EN AMBOS OJOS:

	OJO DOMINANTE	OJO NO DOMINANTE
LENTE INICIAL	Adición alta	Adición alta
PRIMER AJUSTE	Adaptar adición baja	Adición alta

2º AJUSTE: Si la visión aún no es satisfactoria, añada lentes oftálmicos de la caja de pruebas en pasos de -0.25D en el ojo dominante (llevando adición low en ese ojo) y continuar evaluando la visión binocularmente con iluminación normal. Cambie la potencia del lente de contacto cuando la visión sea satisfactoria.

Referencias: 1. Data on file. Bausch & Lomb Incorporated. Rochester, NY. 2. Thirty-nine ECPs (from 10 countries) refitted 422 existing soft contact lens wearing presbyopes into PureVision®2 for Presbyopia lenses.

MULTIFOCAL Reg. 2666C2017 SSA

No. de Aviso: 203300202C6398 Lea las instrucciones de uso. Material dirigido al profesional de la salud.

BAUSCH + LOMB
ULTRA® contact lenses
with MoistureSeal® technology